

Betjening af Autoperimetri

1. Pt vælges i Emar , vælg modul Extern, vælg EYESUITE Perimetri
2. Vælg Perimetri, start med o.dxt og OP6/G TOP WW
3. Korrektion udregnes i henhold til instruks og glas sættes i linseholder.
4. Pt vejledes.
5. Giv pt håndtag med trykknop, sæt hvid klap for det venstre øje og sæt pt tilrette med pupil i fokus.
6. Lyset dæmpes i undersøgelsesrummet.
7. Undersøgelsen startes ved tryk på Start.
8. Venstre øje undersøges tilsvarende.
9. Data gemmes ved at lukke programmet ned på det røde kryds.