

## Betjening af Icare

1. Start Icare ved at trykke på måleknappen.
2. Når displayet viser "LOAD", sættes proben i.
3. Tryk 1 gang på måleknappen for at teste proben.
4. Pt vejledes.
5. Sæt pandestøtten mod pt pande og indstil den evt.
6. Proben holdes ud for pt`s cornea i en vinkel på 90 gr.
7. Tryk på måleknappen 6 gange.
8. Målingen er færdig, når der kommer et langt "beep".
9. Data aflæses i displayet.