

Betjening af Retinomax

1. Tænd på ON-knap
2. Både K keratometry og R refraktion skal lyse grønt
3. Vejled patienten om formål og fokusering på tulipanen
4. Sæt dig foran pt og placer Retinomax foran højre øje.
5. Tryk på aftrækker på håndtaget.
6. Vedbliv med at måle indtil display viser OK
7. Der måles tilsvarende på venstre øje
8. Når målingerne er klare, ses røde og blå markeringer.
9. Målingerne overføres til journal ved at vælge Modul Refraktion, vælg Overfør +
10. Hold Retinomax rette med den tændte printerstation og tryk på PRINT