

## Betjening af refraktor og tensionsmåler

1. Vælg pt og vælg modul Refraktion.
2. Sæt pt til rette i refraktionsmåleren.
3. Pt vejledes.
4. Indstil refraktor til  

R/K	NT	3D	A
-----	----	----	---

  
ved hjælp af knapperne i venstre side.
5. Stil skarpt på øjet og afvent at målingen færdigmeldes.
6. Ved tensionsmåling trækkes joystick mod dig selv.
7. Stil skarpt på øjet og afvent måling
8. Data overføres til journal ved tast på Indlæs, vælg??
9. Ved manuel måling indføres data ved tast på Ret
10. Data skal ALTD gemmes ved tast på Gem.
11. Refraktor nulstilles efter brug ved tast på 2. nederste knap i venstre side.