

Procedure Rengøring af endoskop

Den Danske Kvalitetsmodel – Speciallægeklinikken Centralen		
Instruktioner		Side: 1 af 1
Rengøring af endoskop		Dok. nr.: I-012
Målgruppe: Sygeplejersker		Version: 2
Udarb.: Kirsten+personale	Godk. af: Ken	Dato: 05-10-2015



Manuel rengøring af fiberskoper uden arbejdskanaler (som anvendes over stemmelæberne)

- Fjern grove tilsmudsninger fra skopet
- Kontrollér skopet for lækage
- Skopet vaskes i enzymsæbe* efter anvisning på emballage
- Skyl efter med vand og desinficér skopet
- Skopets overflade tåler ikke sprit – brug evt. Wet-Wipe desinfektions servietter (se datablad).
- Skopets optiske flader samt lysindtag aftørres med en vatpind vædet med 70% hospitalssprit

*KARL STORZ Endoskopi Danmark anbefaler følgende **enzym-sæber** til brug ved rengøring af KARL STORZ fiberskoper:

- Ecolab's Sekusept MultiEnzyme (Mærsk Andersen)
- Ultrasan (Brenntag / HCI Desinfektion)
- Bodedex Forte (Kirurdan)

Ved ønske om brug af andre sæber, spørg da efter liste over godkendte produkter.