

Rengøring af instrumenter inden autoklaving

1. Ultralydsbadet fyldes med demineraliseret vand og et tryk Sekusept sæbe.
2. Sakse, pincetter og andre småinstrumenter skylles under rindende koldt vand og vaskes med en tandbørste.
3. Phaco- og sugeskylléhåndtag skylles og rengøres på vanlig vis (sæbe-vand-sprit).
4. Sakse, pincetter og andre småinstrumenter lægges forsigtigt i ultralydsbadet. Start på startknap og lad dem ligge i i 10 min.
5. Phaconålen skrues af og skylles i ultralydsbadet som de øvrige småinstrumenter.
6. Efter 10 min slukkes ultralydsbadet og instrumenterne tages op og lægges i demineraliseret vand (i flad beholder).
7. Derefter lægges de i sprit (i flad beholder) i ca 5 min. Phaconålen skylles igennem med sprit.
8. Instrumenterne lægges til tørre på et rent klæde – evt. piustes tørre.
9. Pakkes og autoklaveres som vanligt.

HUSK: man må aldrig stikke fingrene i ultralydsbadet, mens det kører.