

Vejl. til sporprøver i autoklaven

1. Køres rutinemæssigt hver 3. mdr og tilsendes fra Statens Seruminstitut. Vejledning er vedlagt sporprøverne.
2. Der køres 3 sporprøver i samme cyklus.
3. 2 af sporprøverne anbringes i hver sin cat.kasse. Den 3. pakkes i autoklaveringspapir og placeres nederst på bakken.
4. Prøverne sendes til Statens Seruminstitut i den medfølgende kuvert.
5. Statens Seruminstitut sender et diplom til opsætning i venteværelset, hvis alt et ok.